

Gipslöser



Dental

Reinigt mühelos

- Anrührbecher
- Kunststoffprothesen
- Abdrucklöffel
- Güsse

von Dentalgips und gipsgebundenen Einbettmassen – auch an schwerzugänglichen Stellen.

Anwendung:

Die zu reinigenden Gegenstände in die unverdünnte Lösung legen.

Ultraschall und Erwärmung des Bades auf ca. 40 – 50°C beschleunigen den Lösevorgang des Gipses.

Reinigungsdauer:

ca. 20 – 80 Min.

Nach der Entnahme aus dem Bad mit Wasser abspülen. Die Wirkkraft ist während des Reinigungsvorganges an der Bläschenbildung zu beobachten.

1000 ml lösen ca. 100 g Gips vollständig auf.

Mindesthaltbarkeit:

12 Monate